

禁点眼

EX-O₂

O₂C.L.ケアプラス

酸素透過性ハードレンズ用の洗浄・保存液です。頑固なタンパク汚れをレンズ保存中に分解洗浄できるタンパク分解酵素洗浄液「O₂C.L. ケアプラス」の組合せでお使いいただくことに効果的です。

【すべてのO₂・ハードレンズに使えます】

使用方法

1. レンズがしゅうぶん浸る量のO₂C.L. ケアプラスを保存ケースに入れます。
2. 目からはずしたレンズを保存ケースに入れて、一晩(4時間以上)保存してください。(この間、レンズに付着した汚れを落としやすくします。)
3. 石けんなどで手をきれいに洗った後、レンズを保存ケースから取り出し、レンズについているO₂C.L. ケアプラスでこすり洗いをします。
4. レンズのヌルヌルした感じがなくなるまで水道水でしゅうぶんすすいであらわしてください。

※誤った取扱いをするとレンズが使用できなくなるばかりでなく、目に障害を起す場合がありますので、必ず使用方法に従って使用してください。

※レンズの取扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

使用上の注意

- 点眼をしないこと。誤って目に入った場合は直ちに流水(水道水)をよく洗い流し、眼科医の診察を受けてください。
- 服用しないこと。誤って口に入れた場合は直ちに水道水でよくすすぎ、医師の診察を受けてください。
- 万一、目や皮膚に異常を感じたら使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 使用後の保存ケース内のO₂C.L. ケアプラスは捨て、保存ケースは水道水できれいに洗って自然乾燥させ、清潔に保ってください。
- 溶液の汚染を避けるため、ボトルの注ぎ口に、指など触れないでください。また、使用後はキャップをしっかりとめてください。
- 直射日光を避け、お子様の手の届かない所に室温で保管してください。
- 開封後はなるべく早く使いきってください。
- 本液は、消毒液ではありません。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

主 成 分:両性界面活性剤
配合成分:等張化剤、緩衝剤、エデト酸ナトリウム

販売元: 大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16
Made in Japan

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184-328

受付時間 午前10時~午後5時(土日曜、祝祭日を除く)

発売元: アイミー株式会社

AM18-06-001

使用期限:

製造番号:

すべてのO₂・ハードレンズに使えます

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用
洗浄保存液

すぐれた抗菌力!!

抗菌

O₂
C.L.ケアプラス

120mL



ボトル
キャップ
中 栓
ラベル
外装フィルム



4 975175 035262