

Pure water

精製水

コンタクトレンズ用

500mL



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

本品は、イオン交換樹脂により精製し、ろ過後、UV(紫外線)処理した水です。

〔用途〕

- 1.ソフトコンタクトレンズの保存液、すすぎ液を作るための顆粒、錠剤を溶かすための水として(本製品のみでは、ソフトコンタクトレンズの保存、すすぎには使用できません。)
- 2.ハードコンタクトレンズのすすぎ液として

〔その他の用途〕

- 1.スチームアイロン用の水として
- 2.加湿器、加湿吸入器用の水として
- 3.バッテリーの補充液として

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- 1.直射日光を避け、開封後は密栓して、なるべく冷蔵庫等の冷所で保管してください。
- 2.キャップ、ピンの口等は、清潔に取り扱いの上、なるべく早くご使用ください。
- 3.他の容器に入れたものは、元に戻さないでください。
- 4.レンズのすすぎ・保存に使った液は、再度使用しないでください。
- 5.使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
- 6.もし目に刺激を感じたり、異常を感じたときは、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

製造番号

使用期限



4 975175 050333



キャップ
ボトル
外装フィルム



「キャップのあけかた」
指の腹で押し上げるように開けて下さい。

「注意」
爪をかけて持ち上げると爪を傷つけるおそれがあります。

「環境を配慮した、たためるボトル採用」



- ①ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
- ②しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ、廃棄する。

G11-FL