

ソフトコンタクトレンズ用保存・すすぎ液
ソフトコンプラス

抗菌

スティック入り

レンズや目に有害な雑菌の繁殖を抑えた
0.9%の食塩水です。



500mL



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

ソフトコンプラスの特徴

- ① ソフトコンタクトレンズの
コールド消毒及び煮沸消毒後
のすすぎ液としてご利用いた
だけます。
- ② 煮沸消毒・蛋白除去の酵素溶解
液としてご利用いただけます。
- ③ 抗菌スティック中の銀イオン・
Ag⁺のはたらきで雑菌の繁
殖を抑えます。(レンズを消
毒するものではありません。)

〔用途〕

ソフトコンタクトレンズの保存・
すすぎ液として

製造番号

使用期限



キャップ
ボトル
外装フィルム

〔保管及び取り扱い上の注意〕

1. 開封後は冷蔵庫で保管の上、なるべく早
くご使用ください。また、キャップ、ビン
の口等は清潔にお取り扱いください。
2. 本品は移し変えないでご使用ください。
また、他の容器に入れたものは、元に戻
さないでください。
3. レンズのすすぎ・保存に使った液は、再度
使用しないでください。
4. コンタクトレンズのケア以外の目的で
使用しないでください。
5. 使用期限の過ぎたものは使用しないで
ください。
6. 目に刺激や異常を感じたときは、直ちに
使用を中止し、この製品を持って、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してくだ
さい。



「キャップのあけかた」
指の腹で押し上げるように開けて
下さい。

「注意」
爪をかけて持ち上げると爪を傷つける
おそれがあります。

〔環境を配慮した、たためるボトル採用〕



- ① ボトルの真ん中を両手で持ち、つむぎ。
- ② しっかりと押さえ込んだ後、空気が
入らないようにキャップをしめ、
廃棄する。

H12-FL